

Karbist välja:

1. USB laadija.
2. H₂ gaasi hingamise voolik
3. Kork vesinikvee tegemiseks.
4. Kork vesinikgaasi hingamiseks.
5. Tihendid ja vaheühendused plastikvee pudeli h₂ masina külge krüvimiseks.

Esiteks võta pudelist välja lisatihendid ning veepudeli ühendused.



Eemalda pudeli ja H₂ aparadi vahel olev kile ja membraani pealt kummimuhv.



Vala vesi pudelisse jäta pealt 1-2 cm vaba ruumi. Vajuta nupule üks kord läheb sinine tuluke põlema, see on 5minutit. Kaks korda järjest vajutades läheb roheline tuli põlema. Reaalselt 5 minutiga tekib 1.14ppm ja 7 minutiga 1.28ppm vesinikvesi.



H₂ hingamiseks keera teine kork peale ja pane hingamisvoolik külge. Iga 7 minuti järel uuenda mullitamise aega. Hingamise efekti saavutamiseks oleks vaja 30 minutit järjest hingata. Tootlikkus 20ml/min.

